

Instrukcja obsługi czytników identyfikacji elektronicznej zwierząt seria RF-CNT50



START

Naciśnij przycisk "START" aby rozpocząć pracę z urządzeniem.

(urządzenie włączając się poinformuje nas sygnałem dźwiękowym wyświetli się również na wyświetlaczu czytnika napis "Reading..." informujący o gotowości do wykonywania odczytów). W tym momencie możemy dokonywać jednego odczytu numeru mikroczipa lub wielu mikroczipów. Nie używany czytnik pozostaje gotowy do wykonywania odczytów przez 15 sekund po czym przechodzi automatycznie w stan uśpienia.

Dane o odczytanych mikroczipach pozostają w pamięci urządzenia.



Dane z pamięci czytnika przenieść można do komputera za pomocą oprogramowania dostępnego u sprzedawcy czytnika. W pierwszym etapie należy zainstalować sterowniki FT232 Driver CDM20802_Setup.exe a w drugim etapie uruchomić program Hand-held Reader uploader.exe

Czytnik z komputerem należy podłączyć za pomocą kabla USB znajdującego się w pudełku.

Do zasilania czytnika PetScan RF-CNT50usb służy bateria alkaliczna 9V, nie jest ona elementem zestawu. Prawidłowy montaż baterii, kierunku potencjałów, przedstawia poniższa fotografia.

Uwaga: proszę nie pozostawiać baterii wewnątrz urządzenia przez dłuższy okres czasu, może to skutkować uszkodzeniem baterii bądź jej całkowitym rozładowaniem.

